

Ear Band-It

Hoe te gebruiken?

1. Bereid je oren voor – Als je Putty Buddies oordoppen gebruikt, maak ze plat en plaats ze over je gehoorgang voordat je de hoofdband omdoet.
2. Plaats de hoofdband – Wikkel de Ear Band-It om je hoofd en zorg ervoor dat beide oren goed bedekt zijn. De hoofdband kruist op of onder de haarlijn.
3. Pas de pasvorm aan – Zet hem vast in de nek voor een comfortabele pasvorm en gebruik de klittenband om hem stevig te fixeren.
4. Controleer het comfort – Zorg ervoor dat hij niet te strak of te los zit; hij moet goed blijven zitten tijdens het zwemmen. Draag hem onder het haar voor het beste resultaat.
5. Verwijderen & opbergen – Haal de hoofdband na gebruik voorzichtig af en bewaar hem op een droge plek.